



Release notes VisiQuick

Release 2019.1 – 14 februari 2019 – VisiQuick 3 versie 819

Nieuwe apparaten	Ticket	Nieuwe functies/verbetering bestaande functies
	#2896	Remote X-ray ondersteunt Instrumentarium Snapshot.
	#2963	Remote X-ray ondersteunt Hamamatsu sensor.
	#2962	Remote X-ray ondersteunt Dürr Vista Pano.
	#2867	3D aquisitie via NCI is gerealiseerd voor: Kavo, Digora, Instrumentarium.
		Betere ondersteuning van meerdere VisiQuick installaties op één terminal server.
	#2910	Bij opening van de RDP (remote desk top) sessie op een andere werkplek, wordt automatisch de röntgen koppeling vernieuwd.
	#2958	Verbeterde koppeling met Kodak/Carestream.
	#2961	Verbeterde koppeling met Sirona: bijzondere karakters worden geaccepteerd.

Release 2018.1 – 6 juni 2018 – VisiQuick 3 versie 810

Nieuwe apparaten	Ticket	Nieuwe functies/verbetering bestaande functies
KAVO	#2625	Beveiligde modus VisiQuick i.v.m. AVG/GDPR.
OP2D	#368	Uitgebreide log functie i.v.m. AVG/GDPR.
OP3D	#2578	Nieuwe KAVO koppeling t.b.v alle oude en nieuwe apparatuur.
OP3D PRO		
Scan Exam (One)	#2611	Remote X-ray: ondersteunt nu ook Kavo Pan Exam, Scan Exam and Scan Exam One.
FONA	#1211	Email/communicatie instellingen worden centraal opgeslagen.
PAN	#649	Uitbreiding van mogelijkheden annotaties.
	#606	Export/import adresboek.
	#2280	Verbeterde schaalfactor en pixel size mogelijkheden bij kalibratie.
	#2346	Automatische update van beelden op alle schermen.
	#1477	Geïmporteerde beelden ook opslaan in 'Last saved images'.
	#2588	Automatische instellingen voor Dürr VistaScan Easy ook in terminal server omgeving.
	#2489	Verbeterde VDDS koppeling naar VisiQuick server.
	#2461	Emboss filter E weer terug in VisiQuick.
	#2429	OLE slepen van beelden naar webapplicaties zoals in Invisalign.
	#2550	Slepen van miniaturbeelden naar X-ray en kleurenstatus.
	#1187	Mogelijkheid tandposities toegevoegd aan kleurenfoto's.
	#2643	Drivers archief verplaatst van CD naar FTP download.



Release notes VisiQuick

Release 2017.2 – 19 juli 2017 – VisiQuick 3 versie 777

Nieuwe apparaten	Ticket	Nieuwe functies/verbetering bestaande functies
		VisiQuick is CE gecertificeerd.
	#2412	VisiQuick is compatibel gemaakt met de nieuwste driver van Kodak /Trophy.
	#2395	
	#2401	Het is mogelijk om de eigen patiënt views te bewerken en te bewaren.
	#2392	VisiQuick is compatibel gemaakt met de nieuwste driver van Vatech.
	#2387	Er wordt nu voorkomen dat VisiQuick op de voorgrond treedt bij het wisselen van patiënt in het administratiepakket met gebruik van een enkel scherm.
	#2293	De replicatie functie werkt sneller en gebruikt minder geheugen.
	#1549	De lock status van X-ray devices wordt na gebruik onmiddellijk vrijgegeven.

Release 2017.1 – 18 mei 2017 – VisiQuick versie 767

Nieuwe apparaten	Ticket	Nieuwe functies/verbetering bestaande functies
<ul style="list-style-type: none"> Scanner: Fona ScaNeo Apixia PSP Net OPG: Fona 	#2078	Ondersteuning van Vatech CT Ez3D-I viewer.
	#1970	Ondersteuning van Apixia SDK 3.
	#1797	Mailen vanuit Simplex verstuurt röntgenfoto's nu inclusief ingebrande patiënt informatie.
	#1525	CC en BCC optie toegevoegd bij verzenden röntgenfoto's vanuit VisiQuick.
	#832	Mail naar meerdere ontvangers vanuit VisiQuick mogelijk.
	#747	Bij mailen vanuit Exquise kunnen VisiQuick röntgenfoto's toegevoegd worden.
	#607	Alle teksten beschikbaar in het Noors.
	#243	Mail verzenden ook mogelijk via Gmail/Hotmail/Ziggo.
	#242	Punt en komma toegestaan in decimale velden.

Release 2016.1 – 20 maart 2016 – VisiQuick versie 703

Nieuwe apparaten	Ticket	Nieuwe functies/verbetering bestaande functies
<ul style="list-style-type: none"> Fosforplaat scanner: Instrumentarium Express Origo Intra-orale video camera: Winus I-Cam plus 		



Release notes VisiQuick

Release 2015.1 – 20 augustus 2015 – VisiQuick versie 686

Nieuwe apparaten	Ticket	Nieuwe functies/verbetering bestaande functies
<ul style="list-style-type: none"> Sensor: Trident I-View 		VisiQuick is sneller en stabiel geworden ten opzichte van versie 659.
<ul style="list-style-type: none"> OPG: Kavo Scan eXam One 	#1035	Er zijn twee keuzeopties toegevoegd in het Videovenster (CFG > Aansluiting): - Video-renderer - Videoformaat
<ul style="list-style-type: none"> OPG: Samsung RayScan 	#894	Met de Sigma sensor kan de net gemaakte foto nu blijven staan ook als “Automatisch opslaan” actief is.
	#827	De hintteksten van de röntgenknoppen tonen nu de naam van het apparaat i.p.v. de naam van het stuurprogramma.
	#816	Het is nu mogelijk het contrast met de muis aan te passen wanneer de foto volscherm getoond wordt. Toets hiervoor in volscherm op C.
	#772	Het aansturen van een “ION” scanner is nu mogelijk. Hiermee is het inscannen van analoge röntgenfoto’s makkelijker en sneller geworden.
	#771	Het automatisch sluiten van de fotoweergave bij het maken van een nieuwe opname, is nu instelbaar.
	#764	Het is nu mogelijk naar VisiQuick te koppelen zonder dat VisiQuick op volscherm springt. Het blijft staan waarop het stond.
	#731	Bij gebruik van de Planmeca Dixi sensor wordt nu de resterende tijd voor maken van een opname getoond.
	#722	Voor de FireCR: het is nu mogelijk om alle foto's te laden die zijn opgeslagen in de scanner, i.p.v. alleen de nieuwste foto.
	#675	Het is nu mogelijk de instellingen voor inbranden van gegevens in foto terug te zetten naar standaard.
	#661	Bij de Autocontrastfunctie: het indicatievakje heeft een vaste maat gekregen (niet meer afhankelijk van de schaal van de foto).
	#555	Remote X-ray ondersteunt nu ook de Gendex GX-700 sensor.
	#350	De Functie “Zoek foto’s” is verbeterd: - Onder één knop zitten nu alle zoekfuncties. - Het zoeken is aanzienlijk sneller geworden. - Zoeken op datumbereik is nu mogelijk. - Zoeken op soorten afbeeldingen is nu mogelijk.
	#331	Afdrukprofiel maken: het logobestand kan nu ook Tiff of Jpeg zijn.



Release notes VisiQuick

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2014	651/659	3Disc FireCR scanner		
	651	Planmeca Pro scanner	651	Inbranden patiëntinformatie en foto-informatie in geëxporteerde/gemaalde foto's
	648	Apixia scanner	648	Opnamedatum + tijd wordt nu zichtbaar bij postzegelfoto's, zowel in een "fly-over" venster als op de statusbalk van VisiQuick
	648	Sirona XIOS Supreme/Select sensor	648	Metingen zijn nu ook zichtbaar in "volledig scherm" weergave
	648	Optime DXR-60 (2013 model)	648	Nieuw gemaakte röntgenfoto's zijn nu direct zichtbaar in vergelijkingsweergave
			648	Nieuwe knop in hoofdvenster om snel externe afbeeldingen te importeren. Ondersteunt ook automatische import.
			648	Invoervenster heeft optie om geïmporteerde afbeeldingen van opnamedatum te voorzien.
			648	Ondersteuning van "OLE drag & drop" om eenvoudig foto's naar andere programma's (zoals PowerPoint) te kunnen kopiëren.
			648	Diverse log-functies in VisiQuick sterk uitgebreid.
			648	Importeren van Kodak 2-D beelden.
		648	Ondersteuning van Schick pre-filters.	
		648	Email mogelijkheden uitgebreid met: stuur naar patiënt e-mailadres(sen) en naar kliniek.	

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2013	641/644	Cranex Novus e		
	640	Whicam Story2 intra orale camera		
	640	MyRay C-U2 intra orale camera		
	640	KaVo Diagoncam		
	640	KaVo Pan eXam		
	637	Sirona Teneo/Sinius behandelstoel		
	637	Morita Veraviewepocs 3D R100		

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2012	632/633	Dürr VistaCamIx intra orale camera		
	632/633	Winus 100D intra orale camera		
	631	Kavo Estetica E80/E70 behandelstoel	631	In het venster "Kies patiënt" is de knop "Kies praktijk" zichtbaar voor alle VisiQuick types (standaard, veterinaire, lab). Met deze knop kan een andere patiëntenlijst worden gekozen.
	630	Kodak CS1600 intra orale video camera	630	Importeervenster kan PNG foto's importeren.
	629	Ajat OPG		
	625	ASAHI OPG	625	Importeren van Morita 2-D beelden
			625	In de titelbalk van VisiQuick kan de geboortedatum van de patiënt getoond worden.
	623	Scanora 3D	623	Invoervenster kan PNG bestanden importeren.
	623	Kodak CS7600 scanner		



Release notes VisiQuick

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2011	621	Kavo Scan eXam	621	Nieuwe knop 'occlusale modus' voor Digora Optime om nieuwe occlusale opnames automatisch aan elkaar te kunnen hechten. Werkt alleen voor Optime Plus en UV.
	620	Progeny ClearVision		
	619	Cranex 3D/ Scanora 3D	619	Link met OrthoAnalyzer toegevoegd
	616	Digora Toto sensor	618	Optie toegevoegd om foto's te croppen.
	612	Schick Elite sensor	616	Gamma pre-filter toegevoegd voor ICat 2D foto's
	612	Sopix 2 sensor		
	612	Gendex GXS700 sensor		

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2010	608	Vatech PAX 400-C1	608	Functie toegevoegd om snel foto's van een andere patiënt naar de geopende patiënt te kunnen verplaatsen (Extra → 'Verplaats foto's van een patient')
	607	VistaScanEasy helderheid foto's verbeterd		
	605	Acteon PSPIX ondersteunt nu IAM	607	Het laden van Dicom-bestanden is verbeterd mbt. Pixel calibratie
	603	Aansturing RSV3 sensor verbeterd	607	De H-knop maakt nu verbeterde helderheid in foto's
	603	Instrumentarium Express	603	Kan nu 3D-opname verwijderen voor iCat/iVision
	603	Optime Plus	602	Digora FMX gamma-correctie toegevoegd
	603	Visiodent RSV3		
	602	Sirona Teneo intra-oral video camera	602	Instrumentarium Snapshot kan nu meerdere opnames achter elkaar maken
	600	Vatech Pax500ECT		
	600	iCat/iVision OPG	600	iCat/iVision kan nu 3D-opnames verplaatsen naar andere patiënt
	598	Kodak K1500 intra-orale video camera		
	598	Planmeca Romexis OPG en RSP	597	Röntgenstatus heeft nu tabbladen met jaren voor periode-indeling
	598	Remote X-ray Kodak Trophy Pan PCI	593	Instrumentarium OP30 kalibratie import/export
	593	CT-link Sirona Galileo 3D	593	Dubbele röntgenstatus: kan jaren vergelijken
	592	myRay Hyperion OPG (en andere)		
	591	Instrumentarium OP30		

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2009	589	Vatech: Pax Duo, Pax Primo, Pax Reve	590	Fotoweergave bewaren
	588	CT-link Planmeca Romexis 3D		
	587	Hamamatsu sensor	587	BSN ondersteuning
	585	Instrumentarium Express	582	Zoek foto's van vandaag
	585	Acteon (Sopro) PSPIX	582	Zoek foto op type PAN/CEPH/DOC
	581	CT-link iCat 3D		
	578	Dürr Dental VistaRay6 sensor		
	577	Dexis USB sensor		
	576	CT-link Morita 3D		
	576	Dr. Suni SDR sensoren		
	574	Dürr Dental VistaCam wireless		



Release notes VisiQuick

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2008	568	Vatech NeoTop	573	VisiQuick replicatie
	567	Owandy OPG implant-modus	568	Koppeling Cephy tracing pakket
	566	CT-link Ewoo 3D		
	565	Progeny Vision DX USB-sensor	565	CT-link (koppeling 3D röntgenpakket)
	563	CT-link Kodak 9000 3D		
	563	VisioDent RSV draadloze sensor	563	Koppeling Digimodel software
	562	Kodak 9000 OPG	558	Koppeling XO Care SmartLink
	560	Dürr Dental VistaScan Net	557	Bewerkte foto's e-mailen
	551	Instrumentarium Sigma-M sensor	551	Blokkeren foto's verwijderen
	550	Ewoo OPG		
550	Owandy sensor, Owandy OPG			

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2007	546	Dürr Dental Vista Cam Pressure sensitive		
	546	PointNix intra-orale camera		
	543	Progeny Mpse/VisionDX sensor		
	543	Dr. Mach lamp camera (IP video)		
	538	Sopix wireless sensor		
	538	Kodak OPG		
	536	Digora Cranex-Novus		
	532	Sopro video camera		
	529	Kodak RVG sensor		

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2006	514	Dürr Dental VistaScan Perio	513	Remote X-Ray
	513	Instrumentarium OP200D/OC200D	512	Implantaatsimulatie
	513		505	RSP Soft-tissue filter
	512		503	Export bewerkte foto
	505		502	Koppeling Qbridge
	503		496	Ondersteuning terminal server clients

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2005	481	SuniCam	483	WIA import voor o.a. Canon 350D
	481	Schick USBcam	483	Datum invoeren bij importeren
			483	Elementcode invoeren bij importeren
			483	Foto's roteren/spiegelen bij importeren
			477	Fototoestel Auto-import

Jaar	Versie	Nieuw apparaat	Versie	Nieuwe functie
2004	461	Digora Optime	461	Toon leeftijd bij elke foto
2003	440	EVA sensor	442	Log-info wordt geregistreerd in DB\Logs
	418	Dürr Dental VistaScan	440	Wachtkamer bewakingsfunctie
	415	VistaRay4 sensor		
2002	404	Dexis sensor op 2000 en XP		
...				
1994	1	VisiQuick 1.0	1	VisiQuick 1.0